

Finalidade:

A cadeira de transporte ESSENTIAL Elétrica com Bandeja é uma cadeira com rodas que permite ao utilizador manter a sua autonomia graças ao telecomando de 2 botões. . Uso interior apenas. O assento da sua cadeira está equipado com uma espuma visco. O ESSENTIEL é um produto exclusivo no mercado, Dispositivo Médico certificado pela CERAH.

Características:

- Autonomia elétrica - Reclinável 100% elétrico : Encosto / Apoio à volta / Apoio sincronizado das pernas
- Cadeira coberta com espuma HD (Alta Densidade)
- Assento equipado com espuma visco
- Travesseiro cervical
- Arreio 4 pontos
- 3 revestimento diferente disponível: Pvc/Polyuréthane : Cacao – Poliéster Veludo água-repelente : Choco Edition
- Revestimento Pvc/Poliuretano em conformidade com o Anti Fire M2.
- 5 seat-largura: 50 cm
- Altura do solo/ assento : 48 cm
- Dimensão geral : 73 cm (T10);
- 2 opções disponíveis : Suporte lateral ajustável (direita/esquerda) – Kit de bateria
- Utilizador de peso máximo : 130 kg
- Peso da cadeira: quase 38 kg

Lote: Ver embalagem

Cor: Castanho

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: Essencial Elétrico

Regulamento: 2017/745

Classificação: Classe I

Fabricante: Innov'SA

Morada do Fabricante: 7 avenue Bernard Pieds
10110 BAR-SUR-SEINE, França

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N. 996, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Para manter a sua cadeira de rodas INNOV'SA em bom estado, deve realizar um serviço de manutenção regular da seguinte forma:

- Controle e limpe as rodas. Substitua as rodas quando necessário.
- Controlo da fixação dos parafusos, das pegas e dos botões de regulação.
- Controle os travões.
- Verifique a cadeira (limpeza, fissuras, danos nas peças estruturais, etc.) e limpe-a. Volte a colocar o revestimento quando necessário.

Instruções de Utilização:

A sua cadeira de rodas só deve ser usada em superfícies onde as quatro rodas toquem no chão e onde haja contacto suficiente para conduzir as rodas de uma forma equilibrada.

É recomendado treinar para uso em superfícies irregulares (pedras de pavimentação, etc.), declives, curvas e para passar obstáculos (passeios, etc.).

Garantir a leitura detalhada do Manual de Instruções.

Imagens do Artigo: